

Heymer **Uno/Duo**

DECKENLIFTSYSTEME

DECKEN-
UNABHÄNGIGE
MONTAGE
MÖGLICH

Hilfsmittel Nr. Uno
22.40.06.0004

Hilfsmittel Nr. Uno Fahrmotor
22.40.06.1003

Hilfsmittel Nr. Duo / Heros 300
22.40.06.2001

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.rehatechnik-heymer.de



Heymer Uno

Das Heymer Schienenliftsystem bietet eine wertvolle Unterstützung für Personen mit eingeschränkter Mobilität, indem es ihnen mehr Unabhängigkeit ermöglicht. Selbst bei einem hohen Grad an Behinderung kann die betroffene Person in der eigenen Wohnung bleiben, ohne dass umfangreiche bauliche Anpassungen erforderlich sind. Das System entlastet zudem pflegende Angehörige und Pflegepersonal, sei es zu Hause, in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Es stehen verschiedene Gurt- und Tragesysteme zur Verfügung, die je nach Art der Behinderung angepasst werden können. Das Heymer Deckenliftsystem eignet sich für alle Räumlichkeiten, unabhängig von Raumhöhe, Decken- oder Wandbeschaffenheit.

Die Kapazität der Akkus wird ständig kontrolliert. Der Heymer Uno ist somit immer einsatzbereit.



Hilfsmittel Nr. Uno
22.40.06.0004

Die **Heymer Uno** ist eine Eingurtkassette, mit der innerhalb eines Raumes gearbeitet wird. Sie ist besonders leicht und bedienerfreundlich.

Die **Uno** wird von dem Handbedienteil gesteuert. Der praktische Tragegriff ermöglicht ein leichtes Abnehmen der Kassette, um diese dann in einem anderen Raum wieder einzusetzen.

Der zentrale Aufnahmehaken unter der **Uno** sorgt für einen geraden Lauf des Tragegurtes und ermöglicht den Einsatz verschiedener Hebevorrichtungen.

Der Distanzgurt wird auf die Höhe des jeweiligen Raumes eingestellt. Das Aushaken des Tragegurtes erfolgt von Hand bei abgelassener Kassette oder mit einem Hilfswerkzeug.



Leicht erklärt auf Youtube

mit Fahrmotor


Mit der Heymer **Uno** Fahrmotor kann der Betroffene sich selbst elektrisch heben und senken, sowie elektrisch in der Schiene fahren.

Für den Schiebebetrieb kann der Fahrmotor einfach umgeschaltet werden.

Der zentrale Aufnahmehaken unter der **Uno** sorgt für einen geraden Lauf des Tragegurtes und ermöglicht den Einsatz verschiedener Hebevorrichtungen.



Hilfsmittel Nr. Uno Fahrmotor
22.40.06.1003

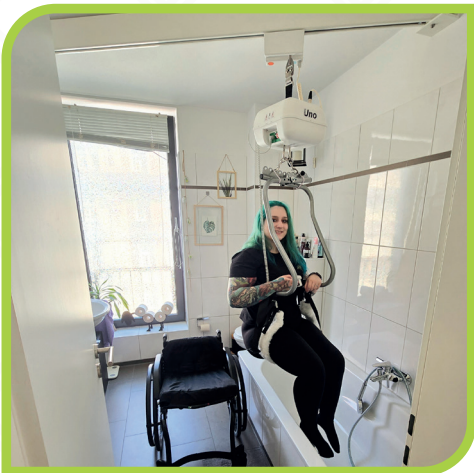

Einfaches Umsetzen ohne Hilfe.



Geeignet für Steh- und Gehübungen.



Bei niedriger Deckenhöhe läuft der Fahrmotor direkt in der Schiene.
Keine elektrische Installation nötig!

Gerne kommen wir auch persönlich bei Ihnen vorbei.



02932 90220-0 oder
info@rehatechnik-heymer.de

Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit	160 kg
Gewicht	9,5 kg
Akku	2 x 12 V / 2,6 Ah
Ladegerät	24 V / 0,5 A mit Texasstecker
Hebegurtlänge	1800 mm (Sonderlänge möglich)



Heymer Duo

Das Schienenliftsystem **Duo** ist für die Verbindung aller Räumlichkeiten konzipiert. Die **Heymer Duo** ist eine Doppelgurtkassette mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Tragegurten. Selbst unter beengten Platzverhältnissen oder wenn der Einsatz anderer Hilfsmittel aus Kostengründen nicht möglich ist, kann die **Heymer Duo** noch verwendet werden.

Die **Heymer Duo** ermöglicht einen Transfer von Raum zu Raum unter dem Türsturz hindurch. Aufwendige und teure Umbauten werden vermieden.

Der Wechsel von einem Tragegurt zum anderen Tragegurt erfolgt elektrisch per Knopfdruck.




Hilfsmittel Nr. Duo
22.40.06.2001

Das Schienenliftsystem zur Verbindung aller Räumlichkeiten.

Mit Einzelhaken an der Treppendecke und der **Heymer Duo** kann man normale Treppen und sogar Wendeltreppen überwinden.




Für jede Räumlichkeit einsetzbar.

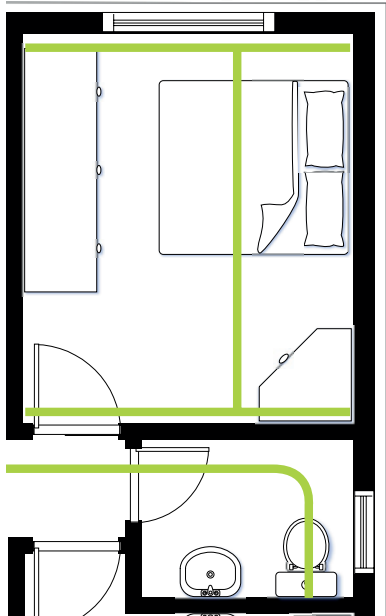

Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit	160 kg
Gewicht	11 kg
Akku	2 x 12 V / 2,6 Ah
Ladegerät	24 V / 0,5 A mit Texasstecker
Hebegurtlänge	1800 mm (Sonderlänge möglich)

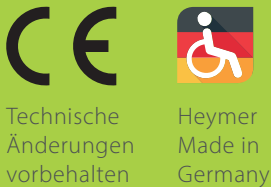

Durchgängiges Deckenliftsystem mit Schienen, das mehrere Räume miteinander verbindet. Das System ermöglicht eine barrierefreie und sichere Bewegung zwischen mehreren Zimmern. Ideal für die Pflege zu Hause.



Mit dem Schienensystem können mehrere Räume ausgestattet und somit verbunden werden, wie z.B. hier Schlafzimmer mit Flur.



An der Tür angekommen, wird der zweite Tragegurt in die Schiene des nächsten Raumes eingehakt. Die **Heymer Duo** fährt per Knopfdruck unter dem Türsturz hindurch.



Man benötigt somit keinen fahrbaren Lifter.

Heymer Heros 300

Liftkassette bis 300 kg Tragkraft.

Patienten mit einem hohen Körpergewicht können vielfach nicht allein aus dem Bett oder dem Rollstuhl aufstehen, weil die Beine das Gewicht nicht tragen können und der Kreislauf versagt. Diese Patienten können auch mit keinem fahrbaren Lifter aus dem Bett oder dem Rollstuhl gehoben werden, da die kleinen Rollen so stark belastet werden, dass ein Rangieren mit dem fahrbaren Lifter auf vielen Böden unmöglich ist.

Mit dem **HEROS 300** können Personen bis 300 kg gehoben und in dem Schienensystem mit Leichtigkeit von A nach B geschoben werden. Die Doppelliftkassette **HEROS 300** besteht aus zwei separaten Hebeeinheiten, die zusammengeschaltet werden.

Die Gewichtsübertragung auf die Schiene erfolgt über zwei Gurte auf zwei miteinander verbundene Fahrschlitten, die innerhalb der Schiene sehr leicht verschoben werden können. Die Schiene selbst wird unter der Decke, von Wand zu Wand oder frei tragend befestigt.



Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit	300 kg
Gewicht	11 kg
Hebegurtlänge	1800 mm (Sonderlänge möglich)



Einsatzbereiche / Montagemöglichkeiten

Wandschwenk-Lift

Der **Heymer Wandschwenk-Lift** ist ein praktisches und effizientes Hebesystem, das insbesondere in Situationen eingesetzt wird, in denen keine Deckenschienen installiert werden können oder sollen.

Diese Lifter sind besonders nützlich in Räumen mit begrenztem Platzangebot, da sie an einer Wand montiert werden. Durch die Schwenkbarkeit der Schiene kann der gesamte Bereich unter dem Lifter zum Umsetzen genutzt werden.

Decken-
unabhängige
Montage-
möglichkeiten.



Gerne erstellen wir, zusammen mit Ihnen, den Antrag auf wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.



Säulenstandlift



Überwindung von geschlossenen und offenen Treppen.



Säulenstandlift: Ein solches System kommt am Swimmingpool oder anderen ähnlichen Umgebungen zum Einsatz.

Treppenaufgänge, Wendeltreppen und teilweise Überwindung von Treppenhäusern: Für diese speziellen Anwendungen gibt es angepasste Hebesysteme, die die Überwindung von Treppen oder Treppenhäusern ermöglichen.

Deckenmontage:

Ideal für Räume mit Stahlbetondecken oder tragfähigen Holzbalken (mindestens 8 cm breit).

Wand-zu-Wand-Montage:

Diese Variante eignet sich sowohl für Leichtbauwände (z. B. aus Rigips) als auch für massives Mauerwerk oder Fachwerkkonstruktionen.

Einzelschiene:

Eine einzelne, flexibel einsetzbare Schiene, die individuell an die Raumsituation angepasst montiert werden kann. Die zwei Punkte im Raum miteinander verbindet, wie z.B. Toilette und Badewanne.

Ständermontage:

Wenn keine Decken- oder Wandmontage möglich ist.

Traversensystem:

Ein H-förmiges Schienensystem, das besonders in der Pflege hilfreich ist – es ermöglicht einen freien Transfer zu jedem Punkt im Raum.

Deckenbogen:

Ergänzend zur Einzelschiene einsetzbar, um Kurven, Ecken oder Bögen im Raum problemlos zu überwinden.

Therapeutisches Reiten



Hauseingang



Schwimmbad/Pool



Wand-zu-Wand-Montage



Ständermontage



Traverse





LIFTERSYSTEME



Gerne erstellen wir, zusammen mit Ihnen, den Antrag auf wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM



Liftersysteme



LiftAccessoires



Barrierefreies Bauen



Zusatzantriebe für Rollstühle



Rehatechnik
HEYMER

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 02932 90220-0

Fax 02932 90220-69

info@rehatechnik-heymer.de

www.rehatechnik-heymer.de



Ihr Sanitätsfachhandel

