



# Heymer RadUn 2

ELEKTRISCHE SCHIEBE- UND BREMSHILFE  
FÜR FALTROLLSTÜHLE  
HILFSMITTEL-NR. 18.99.11.0002

Eingebaute  
Schiebehilfe,  
kein Abbau  
nötig

 **Rehatechnik  
HEYMER**



## TECHNISCHE DATEN:

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Radgröße                            | 24"                                |
| Motor                               | 2 x 12 V / 100 W                   |
| Wartungsfreier Akku                 | 2 x 12 V / 15 Ah (Traktions Akkus) |
| Ladegerät                           | 24V / 5 A                          |
| Vorwärtsgeschwindigkeit*            | 0-5,8 km/h Stufenlos               |
| Rückwärtsgeschwindigkeit*           | 0-3,5 km/h                         |
| Zul. Belastung**                    | 150 kg                             |
| Max. Reichweite in der Ebene*       | 15 km                              |
| Max. Steigfähigkeit*                | 15 %                               |
| Gewicht der Anbauteile am Rollstuhl | 6 kg                               |
| Akkugewicht                         | 8,5 kg mit Tragegriff              |
| Sitzbreite des Rollstuhl            | ab 25 cm                           |

\* unter Testbedingungen / \*\* Patient + Rollstuhl + Antrieb

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen,  
behalten wir uns vor.

## UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM:

- I. Zusatzantriebe für Rollstühle
- II. Liftersysteme
- III. Zubehör für Heymer Liftersysteme
- IV. Barrierefreies Bauen

 **Rehatechnik  
HEYMER**

Von-Siemens-Str. 15a  
59757 Arnsberg

Tel. 0 29 32 - 90 220-0  
Fax 0 29 32 - 90 220-69

info@rehatechnik-heymer.de  
www.rehatechnik-heymer.de

Ihr Sanitätsfachhandel

# Heymer RadUn 2 (für Faltrollstühle)

Die Schiebehilfe **Heymer RadUn 2** erleichtert der Begleitperson das Schieben des Rollstuhls. Mit Hilfe der Elektronik kann der Rollstuhl sehr sanft beschleunigt und abgebremst werden. Beim Anhalten verriegeln die Magnetbremsen automatisch und verhindern somit ein Wegrollen des Rollstuhls.

Der Zusatzantrieb **Heymer RadUn 2** wird mit einem neuen Rollstuhl geliefert, oder kann an vorhandene Rollstühle nachträglich angebaut werden. Im Vergleich zu anderen Antrieben, kann der **Heymer RadUn 2**, auch im Haus am Rollstuhl verbleiben.

In der Rückentasche befindet sich, gut erreichbar, die Ladebuchse, die Betriebsanzeige und die Akkuanzeige.



An der Motorhalteplatte kann ein Verbindungspunkt geschaffen werden für eine beidseitige Fixierung des Rollstuhles mit Patient im Auto.



Auf Grund der innenliegenden Motoren wird die Gesamtbreite des Rollstuhls kaum verändert, so dass er mit dem Zusatzantrieb **Heymer RadUn 2** auch noch durch alle Türen passt.



Das Bedienteil wird bei Pflegestühlen um den Schiebegriff, bei Faltrollstühlen seitlich am Schiebegriff montiert, damit es leicht entfernt werden kann. Die Fahrgeschwindigkeit wird stufenlos über einen Zughebel, die Endgeschwindigkeit über einen Drehknopf geregelt.



Zum Verladen des Rollstuhls wird der Akkupack aus der Halterung unter dem Sitz entfernt, die großen Räder per Knopfdruck abgenommen und die Elektroneinheit wird aus der Rückentasche gezogen. Jetzt kann der Rollstuhl gefaltet und verladen werden.



Durch einfaches Umliegen der Rasthebel in jedem Rad ist ein absoluter Freilauf möglich. Der Rollstuhl kann frei geschoben oder über die Greifreifen gefahren werden.



Ein Montagegeständersystem erleichtert den Anbau der Motorhalteplatte im Sanitätshaus.

