



Heymer DuSi

EINFACHES AUFSTELLEN - KEINE MONTAGE

Trag-
fähigkeit
150 kg

 **Rehatechnik
HEYMER**



TECHNISCHE DATEN:

Untergestell:	Rohre aus Edelstahl
Sitz:	Hautfreundlicher Kunststoff
Gewicht Grundgerät:	ab 5 kg
Zul. Belastung:	150 kg

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM:

- I. Zusatzantriebe für Rollstühle
- II. Liftersysteme
- III. Zubehör für Heymer Liftersysteme
- IV. Barrierefreies Bauen

 **Rehatechnik
HEYMER**

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 0 29 32 - 90 220-0
Fax 0 29 32 - 90 220-69

info@rehatechnik-heymer.de
www.rehatechnik-heymer.de

Ihr Sanitätsfachhandel

Heymer DuSi

Sie haben einen Schlaganfall erlitten und können Ihr Bein nicht mehr in die Dusche heben? Duschhocker, Wandsitze usw. helfen Ihnen nicht, weil Sie erst gar nicht in die Duschtasse steigen können. Entweder bauen Sie das Bad für viel Geld behindertengerecht um, oder Sie verwenden unseren **Heymer DuSi**.



Sie setzen sich, mit nur einem Arm gestützt, außerhalb der Dusche auf den gesicherten Sitz.

Jetzt entriegeln Sie den Sitz, schieben ihn leicht nach hinten und drehen ihn dabei. In dieser sitzenden Position können Sie die Beine einzeln in die Dusche heben.



Der **Heymer DuSi** wird exakt für Ihre Duschtassengröße hergestellt und nur auf den Duschtassenrand aufgesetzt.



Der **Heymer DuSi** wird in 3 verschiedenen Versionen, abhängig von der äußeren Duschtassenhöhe gebaut, damit die gewünschte Sitzhöhe erreicht wird. Zur Herstellung des **Heymer DuSi** benötigen wir folgende Maße der Duschtasse:

- die innere Breite zwischen den Seitenwänden
- die innere Länge zwischen Duschtür und Rückwand
- die innere Tiefe der Duschtasse
- die äußere Höhe vom Fussboden bis Oberkante
- die gewünschte Sitzhöhe (siehe Bestellformular)

Hierzu können Sie sich auch das entsprechende Bestellformular auf unserer Internetseite anschauen.



Der **Heymer DuSi** lässt sich einfach in zwei Teile zerlegen und aus der Dusche entnehmen. Der Sitz lässt sich innerhalb der Dusche beliebig drehen und verschieben, so dass Sie die richtige Position zum Duschen einnehmen können.

